

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Abrir el envoltorio con cuidado, evitando rasgar el condón.
- 2. Asegurarse de que el condón está en buen estado y no ha caducado.
- 3. Colocar el condón en el pene erecto antes de cualquier contacto sexual.
- 4. Apretar la punta del condón para eliminar el aire y dejar espacio para el semen. 5. Desenrollar el condón hasta la base del pene.
- 6. Después de la eyaculación y antes de perder la erección, retirar el pene con el condón puesto.
- 7. Sujetar el condón en la base del pene mientras se retira para evitar que se deslice.
- 8. Desechar el condón en la basura, no en el inodoro.



CONDONES MASCULINOS PRESERVATIVOS BIGOR CLÁSICO AL GRANEL

PRB-001-G



Látex natural, liso, transparente, simétrico, con receptáculo, lubricado, silicón grado médico, libre de sustancias tóxicas, sin espermicida, longitud mínima \geq de 165 mm, anchura media 49 mm y 53 mm (+/- 2 mm), diámetro 33 (+/- 0.2 mm), grosor de 0.07 mm a 0.08 mm, descartable con envoltura hermética, descartable

PRODUCTO NO ESTÉRIL

MATERIALES:

- Látex natural
- Sílica blanca
- Aceite de Silicona

EMPAQUE:

- **Envase primario:** PET/AL/PE. (sachet / blíster)

PRESENTACIÓN

- **Envase secundario:**
- Funda x 100 unidades

APLICACIONES:

- **Uso:** Para la anticoncepción masculina y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.



SEGURIDAD DE USO:

- El condón masculino ha sido diseñado para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Antes de usar un condón, asegúrese de elegir uno que se ajuste adecuadamente a sus necesidades y sea de un material compatible con su piel. Siga las instrucciones de uso.
- Inspeccione el condón antes de usarlo. Si detecta daños, perforaciones o un paquete roto, no lo utilice.
- Evite el contacto con objetos afilados o cortopunzantes que puedan rasgar el condón, como uñas o joyería.
- No utilizar cerca del fuego o fuentes de calor, ya que el material del condón es inflamable.
- En caso de detectar irritación o reacciones alérgicas en la piel, retire el condón y consulte a su médico. Existen opciones sin látex si es necesario.
- No usar lubricantes a base de aceite, ya que pueden dañar el material. Utilice solo lubricantes a base de agua o silicona.
- Asegúrese de desenrollar el condón completamente hasta la base del pene para garantizar una protección adecuada.
- Después de la eyaculación, retire el condón mientras el pene aún esté erecto, sujetando la base para evitar derrames.
- El condón es de un solo uso. Deseche adecuadamente después de usarlo, envolviéndolo en papel o en su envoltorio original y arrojándolo a la basura. No desechar en el inodoro.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y a una temperatura máxima de 30°C.
- Verifique la fecha de caducidad antes de usarlo. No utilice condones que han caducado.



INSTRUCCIONES DE USO:

- 1. Abrir el envoltorio con cuidado, evitando rasgar el condón.
- 2. Asegurarse de que el condón está en buen estado y no ha caducado.
- 3. Colocar el condón en el pene erecto antes de cualquier contacto sexual.
- 4. Apretar la punta del condón para eliminar el aire y dejar espacio para el semen. 5. Desenrollar el condón hasta la base del pene.
- 6. Después de la eyaculación y antes de perder la erección, retirar el pene con el condón puesto.
- 7. Sujetar el condón en la base del pene mientras se retira para evitar que se deslice.
- 8. Desechar el condón en la basura, no en el inodoro.



INTRUCCIONES DE USO DE CONDONES EN EXÁMENES GINECOLÓGICOS

- El personal médico debe lavarse las manos con agua y jabón, luego colocarse guantes estériles.
- Seleccionar un condón adecuado y se verificar que esté en buenas condiciones, sin perforaciones, y dentro de la fecha de caducidad.
- Abrir el empaque cuidadosamente sin dañar el condón.
- Colocar del condón sobre el espéculo o transductor:
- Si el examen requiere el uso de un espéculo, el condón puede colocarse sobre el espéculo. Esto añade una capa de protección. Estirar el condón suavemente sobre el espéculo, asegurándote de que cubra toda la superficie que entrará en contacto con la paciente.
- En exámenes de ultrasonido transvaginal, colocar el condón sobre el transductor para evitar el contacto directo. El condón debe cubrir completamente la sonda y mantenerse en su lugar durante el procedimiento. - Aplicar un lubricante a base de agua sobre el condón antes de insertar el espéculo o transductor para garantizar la comodidad de la paciente y facilitar el examen.
- Una vez colocado el condón, proceder con el examen ginecológico habitual. - El condón funciona como una barrera física para prevenir la contaminación cruzada.
- Al terminar el examen, retirar el condón con cuidado del instrumento, asegurándote de evitar que cualquier fluido entre en contacto con el equipo o el personal.
- Desechar el condón en el contenedor designado para residuos biológicos.
- Cambiar el condón entre pacientes o si se interrumpe el examen.
- No reutilizar los condones, y siempre usar un nuevo condón para cada instrumento en cada examen.
- Usar un condón compatible con el tipo de lubricante que se está utilizando para evitar la degradación del material.