

AMARRES DE SUJECCIÓN PARA PACIENTES

REF.: AMP-001

Uso:

Diseñado para inmovilización de manos o pies, para prevención de caídas y autolesiones.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Diseño ergonómico que distribuye la presión de manera uniforme.

Fabricadas en tela resistente, suave y confortable.

Sistema de cierre mediante velcro.

Bordes acolchados para evitar lesiones por fricción.

Ajustables a diferentes tamaños de extremidades.

Medidas: Largo 50 cm, ancho 9 cm.

Tira de amarre 150 cm de largo (+/- 10 cm).

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. No requiere

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Gorros

2. MATERIAL

- Tela no tejida SMS 35 gramos, 100 % polipropileno, repelente a fluidos corporales, antiestática, resistente.
- Esponja acolchada interna de protección.
- Sistema de fijación de velcro industrial

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 par / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 70 pares / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Verificar la integridad del dispositivo antes de utilizarlo.
- Colocar la amarra alrededor de la extremidad o zona indicada.
- Ajustar sin comprometer la circulación sanguínea.
- Fijar el sistema de cierre según las instrucciones del fabricante.
- Supervisar periódicamente el estado del paciente y el ajuste de la sujeción.
- Retirar inmediatamente si se observan signos de lesión o alteración circulatoria.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

AMARRAS DE SUJECCIÓN PARA PACIENTES

REF.: AMP-001

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Dispositivo diseñado para la inmovilización temporal y segura de pacientes durante procedimientos médicos, traslados o situaciones que requieran limitar movimientos involuntarios, reduciendo el riesgo de lesiones para el paciente y el personal de salud.
- Unidades de cuidados intensivos.
- Servicios de emergencia.
- Psiquiatría.
- Traslado de pacientes.
- Procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieran inmovilización temporal.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar únicamente bajo indicación médica o protocolo institucional.
- No ajustar excesivamente.
- Verificar regularmente la perfusión, sensibilidad y movilidad distal.
- Mantener vigilancia continua del paciente.
- No emplear en dispositivos deteriorados o con daños visibles.
- Registrar el uso de la sujeción de acuerdo con la normativa institucional.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 06-2026