


CAMPO ORTOPEDIA MAYOR

REF.: CCE-008

Uso: Protección del paciente

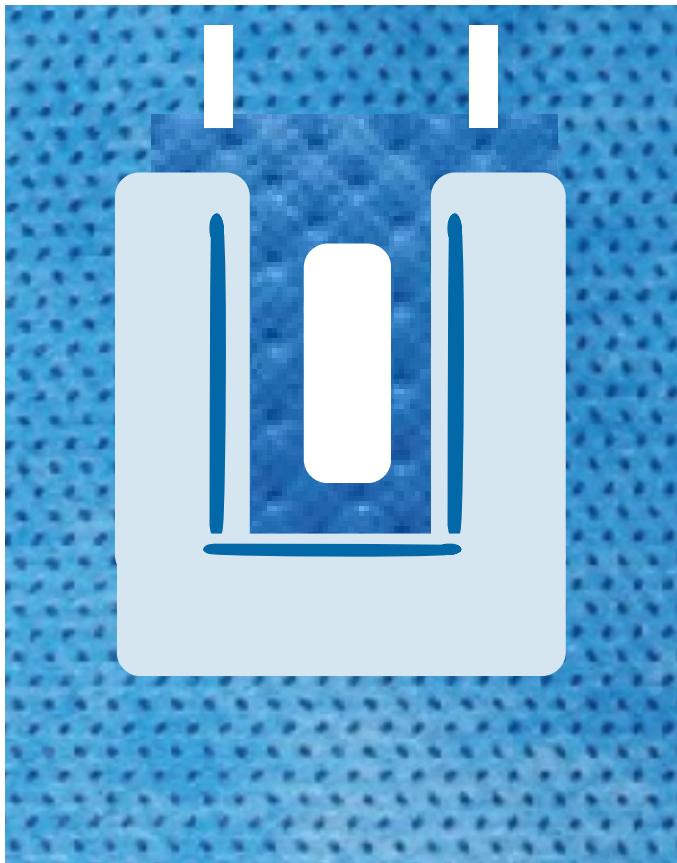

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Campo operatorio con refuerzo absorbente e impermeable en zonas críticas evitando el paso de sangre y fluidos.

Fenestración central de 30 x 12 cm con cintas adhesivas, bolsa recolectora para fluidos, válvula de drenaje y porta cables para sujeción de mangueras.

Largo 240 cm x 160 ancho.

Período de vida útil: 3 años

Registro Sanitario N°. DM-1706-01-10

Clase: No invasivo

Método de esterilización: Óxido de etileno / Estéril

Categoría: Campos

2. MATERIAL

Tela no tejida SMMS 45 gramos 100 % polipropileno

Tela no tejida absorbente e impermeable 96 gramos

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 unidad / Funda grado médico para esterilización.

Envase secundario: 15-20 unidades / Caja de cartón.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

CAMPO ORTOPEDIA MAYOR

REF.: CCE-008

4. INDICACIONES DE USO

El uso correcto de los campos implica una correcta manipulación, apertura, y disposición de los materiales, siguiendo protocolos estrictos de asepsia para prevenir infecciones.

PASO 1: Revisión y preparación:

- Verificar la integridad del producto y la fecha de caducidad.
- Comprobar que el indicador químico de esterilización haya cambiado de color, indicando que el contenido es estéril.

PASO 2: Colocación del campo .

- Colocar el campo siguiendo la dirección de la guía de apertura.
- Si es un campo fenestrado (con abertura), alinear la abertura con la zona quirúrgica.
- Retirar de la fenestración el papel de las cintas adhesivas y adherir al paciente.

PASO 3: Abrir el campo :

- Despliega el campo quirúrgico cuidadosamente sin tocar zonas no estériles.
- Verifica que todo el campo cubre adecuadamente la zona.

PASO 4: Verificación:

- Verifica que todo el campo cubre adecuadamente la zona.
- Evita arrastrar el campo sobre superficies no estériles.

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Producto diseñado para un único uso. No reutilizar.
- Verificar el estado del producto previo a su uso.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y sanitarias vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.



9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Almacenar en un lugar seco, limpio, y protegido de la luz solar directa, a una temperatura no mayor a 30°C y una humedad relativa no mayor a 65%.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccionar visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipular el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Abrir la funda en la zona designada del sellado, evitando el uso de objetos cortantes.
- Evitar el contacto del producto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Diseñado para ser utilizado en procedimientos de artroscopia.
- Puede emplearse en hospitales, clínicas y centros de salud que cuenten con procedimientos quirúrgicos.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar únicamente en procedimientos médicos, o quirúrgicos, siguiendo normas de asepsia y seguridad.
- Emplear en áreas estériles para evitar contaminación cruzada.
- Asegurarse de que el producto se coloque de acuerdo a las indicaciones, cubriendo la zona necesaria del paciente.
- Retirar el producto en caso de deterioro visible, contaminación con fluidos o si se presentan signos de irritación en el paciente.
- Producto no reutilizable.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 08/2025