

MANGA DESCARTABLE (COLOR BLANCO)

REF.: MANG-011

Uso:
Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Elemento de protección personal diseñado para cubrir los brazos desde la muñeca, fabricada en material ligero y resistente.

Con elásticos en ambos extremos para un ajuste seguro.

Medidas: Largo 60 cm, puño con elástico.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. No aplica

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Mangas

2. MATERIAL

- Tela no tejida SS/PP 25 gramos, repelente a fluidos corporales, antiestática, resistente a la abrasión.
- Elásticos en puño y brazo para ajuste.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 100 unidades / Fundas impresas de baja densidad.

Envase secundario: 400 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Verificar que la manga esté íntegra y limpia.
- Introducir el brazo hasta cubrir completamente la zona requerida.
- Ajustar los elásticos en muñeca y brazo.
- Utilizar junto con otros equipos de protección personal cuando sea necesario.
- Retirar evitando el contacto con superficies contaminadas.
- Desechar después de su uso.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MANGA DESCARTABLE

(COLOR BLANCO)

REF.: MANG-011

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

Diseñado para proporcionar una cobertura práctica y cómoda de los brazos, desde la muñeca hasta el antebrazo o brazo completo, ayudando a proteger la piel y la vestimenta frente a salpicaduras, humedad, polvo y otros agentes externos durante diversas actividades. Su uso es adecuado en procesos de limpieza e higiene, manipulación de materiales, actividades de mantenimiento, procesamiento de alimentos, servicios generales y otros entornos donde se requiera una protección temporal para favorecer condiciones adecuadas de limpieza y cuidado.

8. SEGURIDAD DE USO

- Producto de uso individual.
- No reutilizar.
- Sustituir inmediatamente si presenta roturas o perforaciones.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA
DHISVE

PROCEDENCIA
QUITO
ECUADOR
www.dhisve.com

FABRICANTE Compañía Limitada Famedic
DIRECCIÓN Sebastián de Benalcázar OE7-264 y Autopista General Rumiñahui.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.

CONTACTO: +593 95 862 3147
El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 06-2026