

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON TIRAS

REF.: MD-006C

Uso:
Protección.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Diseñado para cubrir nariz y boca, ayudando a reducir la transmisión de microorganismos, gotas y partículas durante procedimientos clínicos y quirúrgicos.

Cuenta con una eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de >91% y una eficiencia de filtración de partículas (PFE) de >95%.

3 pliegues en el centro, **tiras de amarre** y clip nasal para mejor ajuste.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Mascarillas

2. MATERIAL

1° Capa SS/PP (Celeste)

2° Capa (Meltblown)

3° Capa SS/PP (Blanco)

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 50 unidades / Caja de cartón.

Envase secundario: 2000 unidades / Cajas quirúrgicas desechables.

4. INDICACIONES DE USO

- Lavarse las manos antes de manipular la mascarilla.
- Identificar la parte superior con clip nasal.
- Colocar cubriendo nariz, boca y mentón.
- Amarrar las tiras superiores detrás de la cabeza y las inferiores detrás del cuello.
- Ajustar el clip nasal para un mejor sellado.
- Evitar tocar la parte frontal durante el uso.
- Retirar sujetando únicamente las tiras.
- Desechar después de usar y lavarse las manos.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON TIRAS

REF.: MD-006C

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- La mascarilla quirúrgica con tiras es un dispositivo médico desechable diseñado para cubrir nariz y boca, ayudando a reducir la transmisión de microorganismos, gotas y partículas
- Protege al profesional y al paciente de salpicaduras de saliva, sangre y otros fluidos.
- Reduce el riesgo de contaminación cruzada.
- Protección ante la inhalación de polvo, partículas y contaminantes.
- Prevención de enfermedades respiratorias.

8. SEGURIDAD DE USO

- Verificar que la mascarilla esté en buen estado y correctamente ajustada antes de su uso.
- Asegurar un sellado adecuado cubriendo completamente nariz y boca.
- No tocar la parte frontal de la mascarilla durante su uso.
- Cambiar la mascarilla si se encuentra húmeda o dañada.
- No reutilizar mascarillas desechables.
- Retirar la mascarilla manipulando únicamente las bandas elásticas.
- Desechar la mascarilla en un recipiente adecuado después de su uso y realizar higiene de manos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.



MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 05-2026