

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON ELÁSTICO (COLOR AZUL)

REF.: MD-007A

Uso:
Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Diseñado para cubrir nariz y boca, ayudando a reducir la transmisión de microorganismos, gotas y partículas durante procedimientos clínicos y quirúrgicos.

Cuenta con una eficiencia de filtración bacteriana (BFE) de >91% y una eficiencia de filtración de partículas (PFE) de >95%.

3 pliegues en el centro, con ajuste nasal moldeable y bandas elásticas para una fijación cómoda y segura.

Período de vida útil: 5 años

Registro Sanitario N°. 58-DMN-1117

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Mascarillas

2. MATERIAL

1° Capa SS/PP (Azul)

2° Capa SMMS (Filtro)

3° Capa SS/PP (Blanco)

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 50 unidades / Cajas quirúrgicas.

Envase secundario: 2000 unidades / Cajas quirúrgicas desechables.

4. INDICACIONES DE USO

- Realizar higiene de manos antes de manipular la mascarilla.
- Colocar la mascarilla cubriendo completamente nariz, boca y mentón.
- Ajustar el clip nasal al puente de la nariz.
- Colocar los elásticos detrás de las orejas.
- Evitar tocar la superficie externa durante su uso.
- Desechar después de utilizarla o cuando se encuentre húmeda, dañada o contaminada.

MARCA
DHISVE

PROCEDENCIA
QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.

CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MASCARILLA QUIRÚRGICA CON ELÁSTICO

(COLOR AZUL)

REF.: MD-007A

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Procedimientos médicos y odontológicos.
- Áreas hospitalarias y clínicas.
- Consultorios médicos.
- Laboratorios.
- Centros de atención sanitaria.
- Protección del usuario frente a gotas y fluidos de bajo riesgo.

8. SEGURIDAD DE USO

- Verificar que la mascarilla esté en buen estado y correctamente ajustada antes de su uso.
- Asegurar un sellado adecuado cubriendo completamente nariz y boca.
- No tocar la parte frontal de la mascarilla durante su uso.
- Cambiar la mascarilla si se encuentra húmeda o dañada.
- No reutilizar mascarillas desechables.
- Retirar la mascarilla manipulando únicamente las bandas elásticas.
- Desechar la mascarilla en un recipiente adecuado después de su uso y realizar higiene de manos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.



MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 06-2026