

MÁSCARA PROTECTORA CAPUCHA POLIMÉRICA

REF.: MPE-001

Uso:

Protección



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Resistente a fluidos infecciosos tipo filtrante de aura contaminado, con visera de policarbonato anti reflectivo de alta resistencia mecánica, proporcionar una barrera de protección que cubre cabeza, cuello y rostro.

Talla estándar, compatible con casco de sistema de protección personal modelo HP18A.

Período de vida útil: 3 años

Registro Sanitario N°. DM-1706-01-10

Clase: No invasivo

Método de esterilización: Óxido de etileno / Estéril

Categoría: Otros

2. MATERIAL

- Tela no tejida SS/PP 25 gramos blanca, suave y transpirable.
- Tela no tejida SMMS 35 gramos azul repelente a fluidos y antiestática.
- Visera de policarbonato, Anti-reflectivo

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 unidad / Papel grado médico + Film plástico

Envase secundario: 25 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Verificar que el empaque esté íntegro y dentro de la fecha de vigencia.
- Abrir el empaque siguiendo técnica aséptica.
- Cuelgue la máscara, ubicando el orificio en el clip de retención del casco
- Ajustar a los velcro de sistema de cerrado.
- Despliegue la máscara
- Y proceda a cubrir el casco



MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

MÁSCARA PROTECTORA CAPUCHA POLIMÉRICA

REF.: MPE-001

5. ADVERTENCIAS

- No utilice el producto una vez que haya expirado la fecha de caducidad indicada en el empaque.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias y guantes para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Diseñado para proporcionar una barrera de protección que cubre cabeza, cuello y parte del rostro, ayudando a reducir el riesgo de contaminación.
- Áreas estériles hospitalarias.
- Procedimientos invasivos.
- Laboratorios clínicos.
- Centrales de esterilización.
- Áreas de aislamiento y control de infecciones.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar únicamente para la protección y cobertura del usuario durante su estancia hospitalaria o procedimientos médicos.
- Colocar la prenda siguiendo las indicaciones de uso, asegurando que quede correctamente colocada.
- Asegurarse de que no manipule la prenda de forma inadecuada que pueda comprometer su higiene o integridad.
- Utilizar únicamente por personal capacitado.
- Desechar inmediatamente después de su uso.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.



Edición: 06/2026

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.