

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX ESTÉRILES - TALLA 7 (SIN POLVO)

REF.: GTLEE-003

El guante quirúrgico actúa como barrera protectora entre la mano o manos del usuario y el entorno externo. Se trata, por ejemplo, de una barrera contra infecciones entre el paciente y el profesional sanitario o de una protección general de la piel de la mano y los dedos. El dispositivo también puede proporcionar protección terapéutica. Estéril, de un solo uso.



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fabricados en látex de caucho natural, estériles, anatómicos y libres de polvo.

- Forma anatómica (izquierdo/derecho) con dedos curvos.
- Puño con reborde enrollado (beaded cuff).
- Superficie externa microtexturizada.
- Superficie interna libre de polvo.
- Color: Crema
- Espesor: $\geq 0,13$ mm
- Longitud mínima (mm): ≥ 270 mm
- Ancho (mm): 89 ± 5 mm

Registro Sanitario N°. 17904-DME-1224

Período de vida útil: 5 años

Clase: Invasivo

Método de esterilización: Óxido de etileno (EO)

Procedencia: China

2. MATERIAL

- Látex natural, azufre en polvo, acelerador ZDC, óxido de zinc, antioxidante, dióxido de titanio, hidróxido de potasio, caseína al 90 %, dispersante, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, recubrimiento de poliuretano, almidón de maíz modificado, estearato de calcio, nitrato de calcio, glucosa, PAC, agua amoniacal, antiespumante, agente humectante.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario:

1 par / Papel grado médico.

Envase secundario:

50 pares / Caja de cartón

Envase terciario:

500 pares / Caja de cartón

NIVEL DE RIESGO

2

RIESGO MODERADO BAJO

GUANTES QUIRÚRGICOS DE LÁTEX ESTÉRILES - TALLA 7 (SIN POLVO)

REF.: GTLEE-003

4. INDICACIONES DE USO

- Abre la bolsa;
- Despliega la bolsa;
- Coger el guante del revés por la mano izquierda;
- Tire de los guantes de la mano derecha con la mano izquierda; la mano izquierda no debe tocar la superficie del guante;
- Coge el guante por el revés con la mano derecha;
- Tire de los guantes de la mano izquierda;
- La mano derecha no debe apretar la piel de la mano izquierda;
- Inserte la mano izquierda en el guante derecho plegable, tire de él hacia arriba para cubrir la bata.

5. ADVERTENCIAS

- Este producto contiene látex de caucho natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Otros componentes utilizados en la fabricación de los guantes (libres de polvo) también pueden causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

6. PRECAUCIONES

- Para un solo uso.
- No utilizar ni reesterilizar si el envase está dañado.
- Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas.



7. APLICACIONES

- Los guantes quirúrgicos estériles sirven para proporcionar protección contra sustancias no deseadas y peligrosas tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes. Deben utilizarse dentro de un entorno limpio antes de un procedimiento quirúrgico.
- Propósitos operativos. Los guantes se colocan en las manos del personal médico y personal relacionado para la protección del área operativa y la seguridad tanto del personal como de los pacientes.
- Propósitos médicos y odontológicos. Los guantes se colocan en las manos del personal médico y odontológico durante procedimientos de examen para la protección tanto del personal como de los pacientes.

8. SEGURIDAD DE USO

- Utilizar únicamente por personal capacitado.
- Verificar la integridad del empaque antes de usar.
- Seleccionar la talla adecuada.
- Cambiar los guantes si presentan perforaciones o daños.
- Mantener una técnica aséptica adecuada.
- Realizar higiene de manos antes y después del uso.
- Utilizar un nuevo par para cada procedimiento o paciente.
- Suspender su uso en caso de irritación o reacción alérgica.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Debe almacenarse en un lugar seco, limpio y bien ventilado, con una humedad relativa inferior al 80% y alejado de gases corrosivos y de la luz solar.
- Debe transportarse y manipularse con cuidado.

Edición: 06/2026

MARCA

DHISVE
www.dhisve.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

DIRECCIÓN

IMPORTACIONES MEDICALSOLUTIONS CIA. LTDA

Francisco de Orellana LT208 y Fernando de Magallan

CONTACTO:

+593 95 862 3147 contacto@dhisve.com

Medical Solutions