

GUANTES DE EXAMEN SIN LÁTEX NO ESTÉRILES EXTRA SMALL (XS)

REF.: GTNT-001

Uso:

Equipo de protección individual, diseñados para examen y uso general en ambientes sanitarios e industriales.



Dedos
microtexturizados



1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Guantes desechables de nitrilo (color azul), libres de látex y polvo, ambidiestros, con borde enrollado. Ofrecen alta sensibilidad táctil, excelente elasticidad y protección contra agentes biológicos y algunos químicos.

Registro Sanitario N°. 18325-DME-0325

Clase: Invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

2. MATERIAL

- **Nitrilo**, aditivos, pigmentos, dióxido de titanio, azufre y óxido de zinc.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 100 unidades / Caja de cartón.

Envase secundario: 1000 unidades / Caja de cartón.

4. INDICACIONES DE USO

- Lávese las manos antes de ponerse los guantes y sáquelos siempre de su caja original.
- Coloque los guantes tocando solo la zona de la muñeca, evitando tocar la piel del antebrazo.
- Evite tocar superficies no necesarias y cambie de guantes cuando realice una nueva tarea para prevenir contaminación cruzada.
- Retire los guantes sin tocar la piel, volteándolos al revés y manteniendo la superficie contaminada hacia adentro.
- Deseche los guantes y lave sus manos nuevamente; los guantes no sirven como barrera química y su vida útil recomendada es de cinco años.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO: +593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

GUANTES DE EXAMEN SIN LÁTEX NO ESTÉRILES TALLA SMALL (S)

REF.: GTNT-002

5. ADVERTENCIAS

- Este producto está elaborado con componentes que pueden causar reacciones alérgicas; si esto ocurre, consulte a su médico.
- Utilícelo únicamente si el empaque no está dañado.
- Este producto está diseñado para un único uso; no reutilizar.
- Deséchelo conforme a las normas ambientales y sanitarias aplicables.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Usan principalmente en tareas que requieren destreza manual, sensibilidad táctil, comodidad y colocación rápida..
- Prevención de contaminación entre el usuario y el objeto, paciente o superficie manipulada.
- Tareas que requieren colocación rápida y donde la facilidad para poner y quitar el guante es importante.
- Manipulación de materiales no altamente peligrosos (químicos fuertes, solventes o riesgos biológicos de alto nivel NO son recomendados).

8. SEGURIDAD DE USO

- Los guantes de nitrilo sin polvo ofrecen protección básica, pero requieren ciertas medidas de seguridad para evitar riesgos como alergias, contaminación y uso inadecuado.
- Verificar que los guantes esté limpios, libre de obstrucciones o daños. Desechar después de un solo uso.
- No reutilizar guantes desechables.
- Guardarlos en lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.
- Evitar el uso en áreas donde el polvo pueda contaminar (laboratorios de microbiología, quirófanos, trabajo estéril).
- Elegir la talla correcta para evitar roturas y fatiga en las manos.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad



Edición: 12/2025

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.