



**ROLLO DE GASA 100% ALGODÓN,
90 cm X 100 m (DOBLADA)**

REF.: RGS-002

Hidrófilo de algodón al 100%, 90 cm de ancho x 100 m, absorbente con terminaciones laterales, descartable.

Rollo de gasa doblada utilizada para absorber líquidos corporales, limpiar y cubrir heridas durante intervenciones médicas.

NO ESTÉRIL

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	PRESENTACIÓN MÁSTER	EMPAQUE
1 unidad	10 unidades	Funda de polietileno

CÓGIGO	MALLA / HILOS	MEDIDAS
RGS-002	25 x 15	90 cm X 100 m



MATERIALES:

Gasa de algodón 100% algodón, excelente absorción, con terminaciones laterales.

EMPAQUE:

Funda, bolsa de polietileno.

PRESENTACIÓN

Empaque individual.

Funda, bolsa de polietileno.



APLICACIONES

- Se utilizan para cubrir heridas de menor grado y aplicar presión para detener el sangrado.
- Son útiles para limpiar el área alrededor de una herida antes de aplicar un vendaje estéril o medicamento.
- Pueden usarse para proteger la piel alrededor de catéteres, tubos o sitios de inyección.
- Pueden asegurar apósitos, gasas estériles u otros materiales en su lugar.
- Proporcionan soporte adicional en vendajes para evitar la fricción.
- Se utilizan para absorber secreciones o exudados leves en áreas que no requieren condiciones estériles



SEGURIDAD DE USO

- Inspeccione la gasa por ambos lados antes de utilizarla.
- Si detecta daños en el empaque, evite su uso.
- La gasa no estéril no debe aplicarse directamente sobre heridas abiertas, quirúrgicas o infectadas, debido al riesgo de exposición a contaminantes y aumentar el riesgo de infección.
- Antes de usar gasa no estéril, asegurarse de que la piel alrededor de la herida esté limpia para evitar la contaminación microbiológica en el área.
- Cambiar la gasa regularmente para evitar la acumulación de humedad, bacterias o suciedad, lo que podría provocar irritaciones o infecciones.
- En caso de detectar irritación en la piel, retirar la gasa y consultar a su médico.
- Asegurarse de que la gasa no esté contaminada antes de su uso.
- Si la gasa ha estado expuesta al aire libre o ha sido manipulada sin las debidas precauciones, desecharla.
- Mantener la gasa en un lugar limpio, seco y bien cerrado para evitar su contaminación antes de su uso.



INSTRUCCIONES DE USO

- Asegurarse de que el empaque esté intacto antes de abrirlo.
- No usar la gasa si el empaque está dañado.
- Antes de manipular la gasa, asegurarse de tener las manos limpias o usar guantes.
- Desempacar la gasa con cuidado.
- Aplicar la gasa sobre el área deseada.
- No usar en heridas abiertas o áreas que requieran esterilidad.
- Cambiar la gasa si se ensucia o moja.
- Guardar la gasa en un lugar seco y fresco, a una temperatura máxima de 30°C.
- Desecharla adecuadamente si ha estado en contacto con fluidos biológicos.
- Si nota irritación en la piel, retira la gasa y consultar a un médico.

