



ROLLO / CARRETE DE ESTERILIZACIÓN PLANO

Este papel se produce mediante un sistema de alta tecnología en color blanco y ha sido diseñado para garantizar una protección antibacteriana elevada. La impresión incluye indicadores: uno para esterilización por vapor y óxido de etileno (EO). Las tintas utilizadas son a base de agua y no tóxicas.

PRODUCTO NO ESTÉRIL

CÓDIGO	MEDIDAS
STRF-001	50mm*200m
STRF-002	75mm*200m
STRF-003	100mm*200m
STRF-004	150mm*200m
STRF-005	200mm*200m
STRF-006	250mm*200m
STRF-007	300mm*200m
STRF-008	400mm*200m
STRF-009	500mm*200m

MATERIALES:

- Están fabricados con un material plástico de uso médico llamado película laminada transparente, producida en colores verde o azul claro. Esta película está compuesta por PET y CPP, combinada con papel médico de 60 g/m².

EMPAQUE:

Envase primario:

- Bolsa/ funda de polipropileno

Envase secundario:

- Caja de cartón

PRESENTACIÓN:

- ENVASE PRIMARIO: 1 UNIDAD
- ENVASE SECUNDARIO: 2 - 10 UNIDADES

APLICACIONES:

- Se utilizan para la esterilización de artículos individuales mediante procesos de vapor y óxido de etileno (EO). Estos rollos garantizan un empaque con un alto contenido tecnológico para satisfacer las diversas necesidades de empaque en hospitales, clínicas dentales y el ámbito industrial.
- La correcta esterilización se certifica mediante el cambio de color de los indicadores a las temperaturas adecuadas:
- Para esterilización con óxido de etileno (EO), la temperatura es de 30 °C a 54 °C y el color cambia de rosa a amarillo/marrón.
- Para esterilización por vapor, la temperatura es de 121 °C a 132 °C y el color cambia de azul claro a gris oscuro/negro.
- El rollo o la bolsa pueden ser esterilizados solo una vez, ya que son empaques médicos desechables. Por lo tanto, deben ser descartados después de su uso, ya que no pueden reutilizarse para un segundo ciclo de esterilización.

SEGURIDAD DE USO:

ADVERTENCIAS

- Antes de iniciar el proceso de esterilización, asegúrese de que el rollo/bolsa esté lleno como máximo hasta 3/4 de su volumen, de manera que los sellados no se vean obstruidos en los bordes.
- Cubra los extremos y las superficies cortantes de los instrumentos con una protección adecuada.
- Coloque los instrumentos con el mango orientado hacia la apertura del rollo/bolsa.
- No utilice sustancias químicas o disolventes sobre el rollo/bolsa.
- Cualquier impresión o anotación debe escribirse en una etiqueta y pegarse en el lado de papel o película; no escriba directamente sobre el rollo/bolsa y utilice el máximo cuidado para evitar problemas de contaminación durante su uso.
- Revise cuidadosamente el peso de los instrumentos a esterilizar para evitar riesgos de ruptura.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Está prohibido utilizar el rollo/bolsa si está dañado.
- Los rollos/bolsas deben evitar la exposición a la luz solar y almacenarse en un lugar seco. El empaque debe manipularse lo menos posible y mantenerse cerrado.
- El rollo/bolsa debe usarse únicamente después de verificar que no haya polvo en su empaque. Si se utiliza parcialmente, debe cerrarse herméticamente dentro de su protección plástica.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Cortar el rollo o seleccionar la bolsa según el tamaño de los artículos que se deseen esterilizar y colóquelos dentro.
- Colocar los dispositivos con bordes afilados o formas especiales en la posición correcta para garantizar una manipulación segura al abrir.
- Sellar el rollo/bolsa con una máquina de termosellado y registrar los detalles de la esterilización para su seguimiento.
- Colocar el rollo/bolsa sellado correctamente en el esterilizador de vapor o en el esterilizador de óxido de etileno (EO).
- Después de completar un ciclo de esterilización, verificar el cambio de color:
- Bajo esterilización por vapor, el color cambiará de azul claro a gris oscuro/negro si la esterilización fue correctamente realizada. En el caso de esterilización por EO, el color cambiará de rosa a amarillo/marrón.
- Abrir la tapa siguiendo la dirección indicada en el rollo y sacar los artículos esterilizados.

