

ROLLO DE TELA PP/SS DE 50 cm X 100 m (COLOR BLANCO)

REF.: TELA-002

1. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Rollo de tela PP/SS 40 gramos.

Dimensión: 50 cm x 100 m.

Período de vida útil: No aplica

Registro Sanitario N°. No aplica

Clase: No invasivo

Método de esterilización: No aplica / No estéril

Categoría: Telas

2. MATERIAL

Tela no tejida, polipropileno 100%, gramaje mínimo 40 g/m2.

3. PRESENTACIÓN

Envase primario: 1 rollo / Funda de baja densidad (transparente)

4. INDICACIONES DE USO

- **Paso 1:** Desenrollar la tela del rollo sobre una superficie limpia y seca.
- **Paso 2:** Cortar la cantidad necesaria del material, de acuerdo con la longitud requerida para su aplicación.
- **Paso 3:** Colocar la tela sobre la superficie, objeto o área a cubrir, asegurando una cobertura uniforme y un ajuste adecuado según el uso previsto.
- **Paso 4:** Utilizar el producto conforme a la necesidad del usuario y al uso previsto.
- **Paso 5:** Desechar el producto después de su uso, conforme a los protocolos establecidos.

5. ADVERTENCIAS

- Utilizar una sola pieza de tela por usuario o aplicación.
- Sustituir el producto si se humedece, ensucia o presenta signos de deterioro durante su uso.
- Destruir el producto conforme a las normativas ambientales y de salud vigentes.
- En caso de devolución, comuníquese con su representante comercial.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

ROLLO DE TELA PP/SS DE 50 cm X 100 m (COLOR BLANCO)

REF.: TELA-002

6. PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el empaque antes de usarlo. No utilizar si está perforado, roto o presenta cualquier señal de daño.
- Manipule el producto con manos limpias para prevenir contaminaciones externas.
- Para evitar daños al contenido, abrir la funda únicamente en la zona designada del sellado.
- No utilizar objetos cortantes que puedan comprometer la integridad del producto.
- Evite el contacto con superficies contaminadas.

7. APLICACIONES

- Diseñado para brindar limpieza, comodidad y protección en diversas áreas de uso.
- Indicado para coberturas o usos temporales que requieran higiene y protección superficial.
- Utilizado para la cobertura de camillas, superficies, objetos o áreas, ayudando a prevenir la contaminación cruzada y el contacto directo con fluidos.

8. SEGURIDAD DE USO

- Evitar que la tela sobresalga excesivamente de los bordes para prevenir tropiezos o desplazamientos accidentales.
- Asegurar que la superficie cubierta se mantenga estable, plana y sin arrugas durante su uso.
- Desechar el producto después de su uso. No reutilizar.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Mantener en su empaque original hasta el momento de uso.
- Consérvese en un ambiente limpio, seco y libre de polvo, a una temperatura no mayor a 30°C. Proteger de la luz y humedad.

MARCA

DHISVE

PROCEDENCIA

QUITO
ECUADOR

www.dhisve.com

FABRICANTE

Compañía Limitada Famedic

DIRECCIÓN

Sebastián de Benalcázar OE7-264
y Autopista General Rumiñahui.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Importaciones Medical Solutions CIA. LTDA.



CONTACTO:

+593 95 862 3147

El Sistema de Gestión de Calidad de COMPAÑÍA LIMITADA FAMEDIC está certificado bajo la norma ISO 13485 por ICONTEC, organismo acreditado por el SAE. Este certificado es reconocido por la ARCSA, autoridad sanitaria en el Ecuador.

Edición: 01/2026